

FICHE TECHNIQUE

ASEPTONET

PACK DE LINGETTES NETTOYANTES DESINFECTANTES

Réf. **HL114** – Pack de 100 lingettes



CE
0459

USAGES ET PROPRIETES :

Pack de 100 lingettes nettoyantes et désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immérgeables et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant. Lingettes épaisses et douces en fibres 100% biodégradables.

En conditions de saleté (sauf*) :

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn*
- Fongicide EN14562*(sur Aspergillus Fugimatus), en 5 min
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN 14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBC, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, VRS, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 min, Rotavirus en 15mn.

MODE D'EMPLOI :

Soulever le couvercle et retirer la petite étiquette placée sur l'orifice. Tirer ensuite sur la première lingette. Bien refermer le dévidoir après chaque utilisation. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

À utiliser dans les 3 mois après ouverture.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.
Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.

COMPOSITION :

Composition : Ethanol (< 3%), Dimethylbenzylammonium chloride, Propan-2-ol (< 1%).

Format d'une lingette : 18 x 20 cm

CONDITIONNEMENT:

Carton de 12 packs